

Biatain Alginate Ag kann durch Spülen mit steriler Kochsalzlösung problemlos entfernt werden. Entfernen Sie den Verband mit einer Pinzette, damit keine Schmerzen auftreten und es nicht zu Verletzungen am neu gebildeten Gewebe kommt.

Produktbeschreibung

Biatain Alginate Ag ist eine stark saugfähige, antimikrobielle Vlieswundauflage mit hohem Gehalt an G (Guluronsäure) Calciumalginate, Carboxymethylcellulose (CMC) und einem ionischen Silberkomplex (Silber-Natrium-Hydrogen-Zirkonium-Phosphat), der Silberionen unter Vorhandensein des Wundexsudats freisetzt.

Bei der Absorption des Wundexsudats bildet das Alginate ein Gel, welches das autolytische Debridement unterstützt und dabei eine feuchte Umgebung aufrecht hält, die optimal für die Wundheilung ist. Das Gel gewährleistet ein unversehrtes Entfernen ohne Beschädigung des heilenden Gewebes.

Die unter Vorhandensein des Wundexsudats freigesetzten Silberionen bilden einen wirksamen, antimikrobiellen Wirkstoff gegen ein breites Spektrum an Mikroorganismen, die häufig bei einer Keimbesiedlung und Infektion von Wunden vorhanden sind. Dieser Schutz ist für die Dauer von vierzehn (14) Tagen gewährleistet, basierend auf In vitro-Prüfungen. Biatain Alginate Ag kann darüber hinaus aufgrund seiner wirkungsvollen antimikrobiellen Eigenschaften den Geruch bei infizierten Wunden reduzieren.

Biatain Alginate Ag bildet eine wirksame Barriere gegen eindringende Keime.

Biatain Alginate Ag wird nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

Indikation

Biatain Alginate Ag ist zur Behandlung folgender oberflächlicher oder tiefer Wunden mit mäßigem oder starkem Exsudat indiziert:

- postoperative Wunden,
- traumatische Wunden (Hautläsionen, traumatische Verletzungen oder Inzisionen),
- Beinulzera,
- Druckulzera,
- diabetische Ulzera,
- Transplantat- und Spenderstellen,
- Wundhöhlen sowie
- oberflächliche Verbrennungen und Verbrennungen 2. Grades (Teildicke der Haut)

Biatain Alginate Ag ist nur für die äußerliche Anwendung indiziert.

Biatain Alginate Ag enthält Alginate und unterstützt das Stillen leicht blutender oberflächlicher Wunden.

Das Produkt kann auch unter Kompressionsverbänden verwendet werden.

Biatain Alginate Ag kann unter Aufsicht einer medizinischen Fachkraft bei der Behandlung infizierter Wunden oder Wunden eingesetzt werden, bei denen ein höheres Infektionsrisiko besteht.

Kontraindikationen

Biatain Alginate Ag ist nicht indiziert für die Verwendung:

- auf trockenen oder leicht nässenden Wunden
- bei Personen mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber Alginaten oder Silber
- sowie zum Stillen starker Blutungen

Vorsichtsmaßnahmen

Chirurgen/medizinische Fachkräfte sollten sich der Tatsache bewusst sein, dass nur sehr begrenzte Daten zur dauerhaften und wiederholten Verwendung von silberhaltigen Verbänden vorliegen, insbesondere bei Kindern und Neugeborenen.

Biatain Alginate Ag ist für eine kurzfristige Behandlung bis zu 30 Tagen bestimmt.

Der Verband kann haften, wenn er auf trockenen oder sehr leicht exsudierenden Wunden aufgelegt wird. Sollte der Verband an der Wunde haften und sich nicht problemlos entfernen lassen, vor dem Abnehmen leicht mit steriler Salzlösung befeuchten.

Die Wirkung des Verbandes kann durch einen übermäßigen Gebrauch von Wundsalben auf Mineralölgrundlage beeinträchtigt werden.



Advanced Medical Solutions Limited,
Premier Park, 33 Road One,
Winsford Industrial Estate,
Winsford, Cheshire,
CW7 3RT, UK.

Vertrieb durch:

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
Dänemark

Gebrauchsanweisung

23323747 Version 3


Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S. Alle Rechte vorbehalten. © 2020-10-09
21/18/E4 - 44/7/A3

Abbildungen

So wird der Biatain Alginate Ag-Verband angewendet




Biatain Alginate Ag kann mit einer sterilen Schere so zugeschnitten werden, dass der Verband auf die Wunde passt. Verbleibendes Verbandsmaterial sollte wegen Kontaminationsgefahr entsorgt werden.

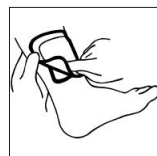


Anlegen eines sekundären Verbandes:
Biatain Alginate Ag muss mit einem sekundären Wundverband verwendet werden, z. B. Biatain-Verband oder Comfeel Plus-Verband, je nach klinischem Zustand der Wunde.

Biatain Alginate Ag kann durch Spülen mit steriler Kochsalzlösung problemlos entfernt werden. Entfernen Sie den Verband mit einer Pinzette, damit keine Schmerzen auftreten und es nicht zu Verletzungen am neu gebildeten Gewebe kommt.


So wird der Biatain Alginate Ag-Streifenverband angewendet

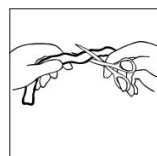

Biatain Alginate Ag kann mit einer sterilen Schere so zugeschnitten werden, dass der Verband auf kleine oder schmale Wunden passt. Verbleibendes Verbandsmaterial sollte wegen Kontaminationsgefahr entsorgt werden.

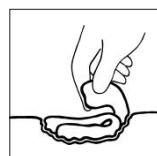

Biatain Alginate Ag ist gleichmäßig/lose auf die Wunde aufzulegen, ohne sie zu tamponieren. Hierdurch kann die Alginate-Faser ein weiches Gel bilden und sich an die Größe der Wundhöhle anpassen.

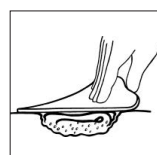

Anlegen eines sekundären Verbandes:
Biatain Alginate Ag muss mit einem sekundären Wundverband verwendet werden, z. B. Biatain-Verband oder Comfeel Plus-Verband, je nach klinischem Zustand der Wunde.

Vermeiden Sie bei elektrischen Messungen wie beispielsweise Elektrokardiogrammen (EKG) und Elektroenzephalogrammen (EEG) den Kontakt mit Elektroden oder leitenden Gels.

Vor Magnetresonanztomographie (MRT)-Untersuchungen ist der Verband abzunehmen.

Im Falle einer klinischen Infektion ersetzt topisches Silber nicht die Notwendigkeit einer systemischen Therapie oder einer anderen angemessenen Infektionsbehandlung.

Gebrauchsanweisung

Vorbereitung der Wunde

- Nehmen Sie, wenn nötig, ein Debridement vor und spülen Sie die Wunde gemäß Standardprotokollen.
- Überschüssige Lösung von der angrenzenden Haut entfernen.

Auswahl des Verbandes

- Wählen Sie die Größe des Biatain Alginate Ag-Verbandes so, dass er etwas über die Wunde hinausragt.

Anlegen des Verbandes

- Den Verband mit einer sterilen Schere abschneiden oder so falten, dass er auf die Wunde passt. Verbleibendes Verbandsmaterial sollte wegen Kontaminationsgefahr entsorgt werden.
- Verband direkt auf den Wundgrund auflegen. Tiefe Wunden locker auffüllen und dabei sicherstellen, dass der Verband die Wundränder nicht überlappt.
- Bedecken und sichern Sie den Verband mit einem nicht-okklusiven oder semi-okklusiven Verband, z. B. Comfeel Plus-Hydrokolloidverband oder Biatain-Schaumverband.

Verbandwechsel und -entfernung

- Biatain Alginate Ag kann bis zu 7 Tage auf der Wunde bleiben. Die Häufigkeit des Verbandwechsels hängt vom Zustand der Wunde und dem Ausmaß des Wundexsudats ab. Zu Beginn kann ein Verbandwechsel alle 24 Stunden angezeigt sein.
- Legen Sie einen neuen Biatain Alginate Ag-Verband an, wenn der sekundäre Wundverband sein Aufnahmevermögen erreicht hat oder eine gute Wundversorgungspraxis einen Verbandwechsel vorsieht.
- Entfernen Sie zum Anlegen des neuen Verbandes den sekundären Wundverband.
- Wenn die Wunde trocken ist, den Verband vor dem Abnehmen mit steriler Kochsalzlösung durchtränken.
- Entfernen Sie den Verband vorsichtig vom Wundgrund und entsorgen Sie ihn entsprechend den lokalen Verfahren und Richtlinien.
- Spülen Sie bei Bedarf die Wunde vor dem Anlegen eines neuen Verbandes in Übereinstimmung mit den Standardprotokollen.

Infizierte Wunden

- Bei infizierten Wunden ist eine entsprechende medizinische Behandlung einzuleiten.
- Die Verwendung des Biatain Alginate Ag-Verbands kann nach Beurteilung des behandelnden Arztes/Chirurgen fortgesetzt werden.

Symbole



Bei einer kontrollierten Temperatur von maximal 25 °C/77 °F aufbewahren.



Vor direktem Sonnenlicht schützen



Sterilisiert durch Bestrahlung.



Nicht wiederverwenden



Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.



Nicht erneut sterilisieren



Gebrauchsanweisung beachten



Vorsicht



Verfalldatum



Chargennummer



Katalognummer



Hersteller



Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft/
Europäischen Union



Für mäßig bis stark exsudierende Wunden indiziert



Trocken halten